

機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

## ニューイージー焼成キャップ

再使用禁止\*\*

### 【禁忌・禁止】\*\*

<使用方法>


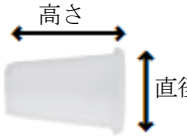
- 再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】\*

[形状・寸法]

本品には、クラウン用とブリッジ用の 2 種類がある。外観は同じだが、クラウン用には内側に回転防止用突起がある。

(単位: mm)

形状	規格	直径	高さ
	3.5/4	3.5	4.7
	4.0/4	4.0	
	4.5/4	4.5	
	5.0/4	5.0	
	6.0/4	6.0	
	3.5/6	3.5	6.7
	4.0/6	4.0	
	4.5/6	4.5	
	5.0/6	5.0	
	6.0/6	6.0	

[原理]

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。S P I ニューイージーアナログに装着し、石膏作業模型を作製した場合に、模型上でのワックスアップのための支台となる。

### 【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。本品は S P I ニューイージーアナログを使用した石膏作業模型を作製した場合に、模型上でのワックスアップのための支台となる。

### 【使用方法等】\*\*

[使用方法]

- 石膏作業模型上の S P I ニューイージーアナログに装着する。スナップ固定式になっているので、装着時にパチッと音がすることを確認する。
- 本品の外側全体にワックスアップを行い、形態を整える。
- 通法に従って鋳造作業を行う。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ワックスアップの際は、鋳造合金構造の壁厚を最低約 0.2 mm にすること。
- 埋没の際は、ワックス界面活性剤の使用は避けること。
- 鋳造後は、アバットメントに装着される基底面内面にサンドブラスト処理をしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

強い光や高熱から遠ざけて、室温で保存すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売業者: 株式会社モリタ

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: トーメン メディカル AG  
Thommen Medical AG

国名: スイス

[お問い合わせ先]

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

F a x 番号: 0800-222-6480 (無料)

E - m a i l : e-customer@morita.com