

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

スクリーマンドレル

【形状・構造及び原理等】

〔原理〕

ネジ部が研削・研磨材を保持する。

【使用目的又は効果】

研削・研磨に用いるディスク、ポイント、カップ等を保持するの
に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) シャンクレスの研磨材を本品のネジ部に取り付ける。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（取り付けるの研削・研磨材の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
- (4) 破折、曲がり等の原因となるため、2N を超える負荷を掛けないこと。

【使用上の注意】*

〔重要な基本的注意〕

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。〔呼吸による粉塵の吸入を防ぐ〕
- (2) 保護めがね等を使用すること。〔目の損傷を防ぐ〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 : **株式会社モリタ**

電 話 番 号 : 06-6380-2525

外国製造業者 : エデンタ エタブリッセメント

Edenta Etablissement

国 名 : リヒテンシュタイン

〔お問い合わせ先〕

問 合 せ 窓 口 : 株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号 : 0800-222-8020 (無料)

F a x 番 号 : 0800-222-6480 (無料)

E - m a i l : e-customer@morita.com