

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

EDポイント ビッグタイプ

【形状・構造及び原理等】

【種類】

本品には、大きさ及び形態の違いにより、標準サイズ、スモール（S）サイズ、シャンクレスの3種類がある。



標準サイズ スモール（S）サイズ シャンクレス

【原理】

ゴム基材に含有されたコランダム砥粒により研磨する。

【付属品】

シャンクレスには、スクリーマンドレール（届出番号：27B1X00109000228）が付属されている。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：エデンタ エタブリッセメント

Edenta Etablissement

国名：リヒテンシュタイン

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com

【使用目的又は効果】

床用レジンは同種の材料の中荒研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) シャンクレスは、スクリーマンドレールのネジ部に取付け。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（製品の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
- (4) 破折、曲がり等の原因となるため、2Nを超える負荷を掛けないこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]