

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用スチール切削器具 70743000

MSスチールバー HP

【形状・構造及び原理等】

【種類】

本品には作業部の形状の違いにより、ラウンド、フィッシャー、インバーテッドコーンの形態がある。全長はいずれも 44.5mm である。



ラウンド



フィッシャー



インバーテッドコーン

【原理】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、作業部を回転させることにより被切削物を切削する。

【使用目的又は効果】

金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を切削するために用いる。

【使用方法等】*

【使用方法】

(1) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定 (製品の被包に記載) の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、振れがないことを確認して使用する。
- (4) 破折、曲がりの原因となるため、過度な圧を掛けないこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：**株式会社モリタ**

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：D+Z

Drendel+Zweiling DIAMANT GmbH

国名：ドイツ

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020 (無料)

Fax 番号：0800-222-6480 (無料)

E-mail：e-customer@morita.com