

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

レーズ用 フェルトコーン

【形状・構造及び原理等】

〔形状、寸法〕

本品の形状は以下のとおりであり、作業部直径 25mm、長さ 50mm である。



〔原理〕

フェルト製の作業部により研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) 歯科技工用電気レーズに装着する。
- (2) 本品を回転させ、被研磨物に作業部をあて、研磨材を用いて研磨する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) 歯科技工用電気レーズメーカーの指定に従ってコア部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（製品の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】*

〔重要な基本的注意〕

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。〔呼吸による粉塵の吸入を防ぐ〕
- (2) 保護メガネ等を使用すること。〔目の損傷を防ぐ〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**/*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：オズボーン Osborn GmbH

国名：ドイツ

〔お問い合わせ先〕

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com