

ヴァリオマルチ焼成キャップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

本品の形状は下図のとおりであり、全長 13.5 mm である。
スリーブ部には 0.5 mm 幅のくぼみと 0.8 mm 幅の帯部分がある。



[原理]

本品は、ヴァリオマルチ用アナログに装着し、石膏作業模型を作製した場合に、模型上でのワックスアップのための支台となる。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】*

[使用方法]

- 石膏作業模型上のヴァリオマルチ用アナログに本品を装着し、オクルーザルスクリューで固定する。
- スリーブ部を咬頭嵌合位で咬合から少し外れるように長さを短くする。
- 本品の外側全体にワックスアップを行い、形態を整える。
- 通法に従って鑄造作業を行う。
- S P I ヴァリオマルチに本品を未使用のオクルーザルスクリューで装着・固定する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 必要に応じて本品のスリーブ部を短くする場合は、0.5 mm 幅のくぼみより短くしないこと。
- ワックスアップの際は、鑄造合金構造の壁厚を最低約 0.3 mm にすること。
- 埋没の際は、ワックス界面活性剤の使用は避けること。
- 鑄造後は、アバットメントに装着される基底面及びスリーブ部内面にサンドブラスト処理をしないこと。また、0.8 mm の帯部分の修正は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

強い光や高熱から遠ざけて、室温で保存すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020 (無料)

F a x 番号：0800-222-6480 (無料)

E - m a i l : e-customer@morita.com