

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 31776000

クリスタルHDミラー

【形状・構造及び原理等】*/**

【形状、構造】

本品にはソフトグリップミラーとワンピースミラーの 2 種類があり、形状は下図のとおりである。

- ・ソフトグリップミラー



- ・ワンピースミラー



【体に接触する部分の主な組成】

ミラーフレーム及びハンドル:

ガラス充填ポリプロピレン、抗菌樹脂

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排に用いる。

【使用方法等】*/**

【使用方法】

ハンドル部を把持して使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 本品のネック部分に強い力を加えたり、屈伸させたりすると、破折や寿命低下の原因になるので避けること。
- (2) ミラー表面のコーティング層は脆弱で傷つきやすいため、表面を過度にこすったり、鋭利なものを押し当てたりするのは避けること。また、インスツルメント等との接触によっても鏡面が傷つく恐れがあるので、丁寧に取り扱うこと。

【保守・点検に係る事項】**

【洗浄】

- (1) 酸性、アルカリ性に弱いため、中性洗剤を使用すること。
- (2) 洗浄後は、よく洗い流し、十分に乾かすこと。
- (3) 滅菌前には超音波洗浄を行うこと。

【消毒】

- (1) 消毒剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるため、次の薬剤は使用しないこと。
 - エタノール
 - 次亜塩素酸ナトリウム
 - フェノール
 - 塩化ベンザルコニウム
 - 塩化ベンゼトニウム
 - グルコン酸クロルヘキシジン 等
- (2) 変色するおそれがあるため、紫外線殺菌は行わないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
滅菌条件：136℃以下（乾燥工程不可）

又は以下の推奨滅菌条件を参考に医療機関内で無菌性保証が担保された条件で滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間

121～124℃ 15 分間

126～129℃ 10 分間

- (2) 他のインスツルメントに触れないように本品をインスツルメントホルダー等に入れ、高圧蒸気滅菌器内に設置すること。
- (3) 乾熱滅菌、ガス滅菌及びプラズマ滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ザーク Zirc Dental Products, Inc.

国名：アメリカ合衆国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com