

一般医療機器 歯科材料9 歯科用研削材料
歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

NTI セパレーティングディスク

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

本品は、ディスク状の技工用研削材である。本品には、サイズの違いにより、3種類がある。

〔原理〕

アルミナ砥粒により切削する。

【使用目的又は効果】

金属、ポーセレン等の切削、形態修正、形成等、及び耐火模型の切削に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) 本品を歯科用マンドレルに装着する。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従ってマンドレル軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（製品の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に回転させて振れがないことを確認して使用する。
- (4) 破折、曲がりの原因となるため、過度な圧を掛けないこと。

【使用上の注意】*

〔重要な基本的注意〕

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。〔呼吸による粉塵の吸入を防ぐ〕
- (2) 保護めがね等を使用すること。〔目の損傷を防ぐ〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：**株式会社モリタ**

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：NTI カーラ NTI-Kahla GmbH

国名：ドイツ

〔お問い合わせ先〕

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com