

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

NTI マンドレル

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、研削・研磨に用いるディスク、ポイント等を保持するシャフトで、保持部がバインダー式である。

【原理】

保持部に研削材又は研磨材を取り付け、ネジで固定する。

【使用目的又は効果】

研削・研磨用のディスク、ポイント等の保持に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 本品に研削材又は研磨材を取り付ける。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（取り付ける研削・研磨材の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
- (4) 破折、曲がりの原因となるため、過度な圧を掛けないこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：NTI カーラ NTI-Kahla GmbH

国名：ドイツ

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com