

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

ジェットポリッシャー パウダー

【禁忌・禁止】*

＜適用対象（患者）＞

- 本品の材質に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある患者
- 慢性の気管支炎、喘息、その他の呼吸器疾患患者〔呼吸困難を引き起こす恐れがある〕

＜使用方法＞

- 本品の材質に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある医療従事者は直接本品に触れないこと。
- 歯肉縁下、歯肉溝、軟組織に向けて直接吹き付けないこと。〔気腫等、出血の恐れがある〕

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、粉末状である。

【寸法】

平均粒子径：100 μ

【体に接触する部分の主な組成】

炭酸水素ナトリウム

【原理】

能動型機器接続歯面清掃器具を用いて、本品を歯面に水流及び空気流で吹き付けることにより、歯面の清掃及び研磨を行う。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 使用前にボトルを 2～3 回軽く振る。
- (2) 本品を能動型機器接続歯面清掃器具に補充する。
- (3) 本品を歯面に吹き付け、清掃・研磨する。
- (4) 清掃・研磨終了後は、速やかにうがい等で口腔内を水洗いする。

【組み合わせて使用する医療機器】

販売名	承認番号
J E T ポリッシャー	22000BZX00746000 承認整理（廃止）済
ジェットポリッシャー2000	22000BZX00747000 承認整理（廃止）済

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 本品の補充は、パウダー残量確認窓の上限赤線を超えないこと。〔本品を上限赤線以上に補充すると本品が詰まる一因となる〕
- (2) 充填物が削られる可能性があるので、コンポジットレジン・セメント充填物等に噴射しないこと。
- (3) パウダーチャンバー内の本品は湿気にさらされないよう注意すること。なお、4～5 日間専用機器内に入れたままの場合には使用せずに本品を入れ換えること。
- (4) 本品が付着している手又は手袋で、ユニット側のカップリングに触れないこと。〔タービン回路に影響を及ぼす可能性がある〕

- (5) 専用機器使用後に、本品がユニット周辺に飛散している場合は、布等で払拭すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- (1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者及び医療従事者は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- (2) 噴射部位近傍に傷、出血、炎症等の異常が認められる場合は使用しないこと。〔症状を悪化させる恐れがある〕
- (3) 医療従事者は、保護メガネ及び防塵マスクを着用すること。〔眼球外傷、ウイルス感染、本品吸引の恐れがある〕
- (4) 患者には保護メガネを着用させること。〔眼球外傷の恐れがある〕
- (5) 万一、本品が目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- (1) パウダーボトルは、蓋をしっかりと閉め、湿気のない場所で保管すること。
- (2) 本品は直射日光を避け、5～27℃の場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*/**

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：デルデント Dell Dent LTD

国名：イスラエル

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

F a x 番号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l：e-customer@morita.com