


歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 16670000

ダイヤモンドリーマー

【形状・構造及び原理等】

【形状・寸法】

全長 : 26.7 mm

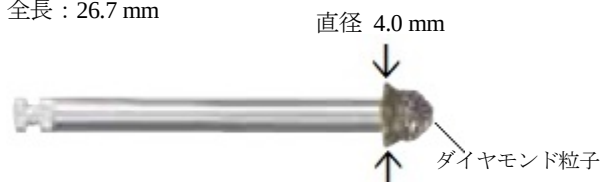

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口 : 株式会社モリタ お客様相談センター
電 話 番 号 : 0800-222-8020 (無料)
F a x 番 号 : 0800-222-6480 (無料)
E - m a i l : e-customer@morita.com

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼 (先端部 : ダイヤモンド粒子)

【原理】

適切な速度で回転させ、刃先で骨を削ることにより、骨を穿孔する。

【使用目的又は効果】

骨等の硬組織を研削するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 本品を歯科用ハンドピース、又はハンド・ドリルエクステンション (別売品) に装着する。
- (2) 本品を低速又は手動で回転させ、骨を穿孔する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースに装着して使用する場合は、メーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 予め口腔外で回転させて振れないことを確認して使用すること。
- (3) 破損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (4) ハンドピースに装着して使用する場合は、回転数 100rpm 以下を目安とし、注水なしで使用すること。
- (5) 本品の使用回数は、100 回が目安である。(100 回まで使用可能ということではない。) 使用状況により、数回で使用限界に達したと思われる場合は、廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件 (日本薬局方による) : 115~118℃ 30 分間
121~124℃ 15 分間
126~129℃ 10 分間
- (2) 136℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 : 株式会社モリタ

電 話 番 号 : 06-6380-2525

外国製造業者 : チュソンテクノ CHEONGSONG TECHNO

国 名 : 大韓民国