

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 31776000

## ダイレクトミラー ゼロ

### 【形状・構造及び原理等】\*

#### 【形状、構造】

本品は、ミラーヘッド及びハンドルからなる一体型の歯鏡である。

#### 【体に接触する部分の主な組成】

ハンドル及びフレーム部：アルミニウム合金（陽極酸化処理）

#### 【原理】

鏡像により口腔内診査を行う。又は、本品の一部（主に、ミラーヘッドやミラー頸部）を舌や口角等に押し当てることにより、舌又は粘膜を排除する。

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査、又は頬粘膜や舌の排除に用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- (1) ハンドル部を把持して使用する。

### 【保守・点検に係る事項】\*

#### 【洗浄】

- (1) 他のインスツルメントとの接触により鏡の表面に傷を付ける可能性があるため、超音波洗浄は避けること。
- (2) 中性の洗浄剤を使用すること。

#### 【消毒】

- (1) クロムメッキ亜鉛合金の印象トレーと一緒に浸漬しないこと。
- (2) 中性の消毒剤を使用すること。

#### 【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間  
121～124℃ 15 分間  
126～129℃ 10 分間
- (2) 135℃以上に加熱しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：**株式会社モリタ**

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ジェイ・モリタ・ヨーロッパ

J. Morita Europe GmbH

国名：ドイツ

#### 【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com