

ハンディパウダー

【禁忌・禁止】*

＜適用対象（患者）＞

- 呼吸器疾患患者[呼吸困難を引き起こす恐れがある]
- 心内膜炎、妊娠中・授乳中、伝染病、糖尿病、免疫不全症（好中球減少症、顆粒球減少症、無顆粒球症、血友病）、放射線治療中、化学療法治療中、抗生物質投与中の患者[深い歯周ポケットへの使用は、菌血症を引き起こす恐れがある]
- 口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者[症状が発症する恐れがある]
- 香料に対してアレルギー反応を起こしやすい患者[アレルギー反応を起こす恐れがある]
- 炭酸水素ナトリウムに対し、発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある患者には、ミントを使用しないこと。[症状を悪化させる可能性がある]
- 塩化セチルピリジニウムに対し、発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある患者には、PMTc+を使用しないこと。[症状を悪化させる可能性がある]

＜使用方法＞

- ミント、リコールは、歯肉溝や軟組織に向けて直接吹き付けないこと。[気腫等、出血の恐れがある]
- 亀裂、損傷の可能性のある補綴物、クラウン、ブリッジに直接噴射しないこと。[破損の恐れがある]
- 専用の歯面清掃器以外で本品を使用しないこと。[意図した効果を発揮できない、ノズル内の粉詰まり、機器の故障等の原因となる]

【形状・構造及び原理等】*/**

【形状】

本品は、粉末状である。

【種類、体に接触する部分の主な組成】

種類	平均粒子径	主な組成
ミント	40 μm	炭酸水素ナトリウム
リコール	65 μm	グリシン
PMTc+	14 μm	エリスリトール、 塩化セチルピリジニウム(微量)

【原理】

能動型機器接続歯面清掃用器具から供給される圧縮空気によって、本品を歯面に吹き付けることにより、歯面の清掃及び研磨を行う。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 使用前にボトルを 2～3 回軽く振る。
- (2) 本品を能動型機器接続歯面清掃用器具に補充する。
- (3) 本品を歯面に吹き付け、清掃・研磨する。
- (4) 清掃・研磨終了後は、速やかにうがい等で口腔内を水洗いする。

【組み合わせて使用する医療機器】

販売名	認証番号
ハンディジェット	226AFBZX00054000 認証整理（廃止）済
エアフロー ハンディ 3.0	229AFBZI00002000

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 機器に残った本品は、ボトルに戻さないで毎回必ず廃棄すること。[粉が固まり、粉詰まりの原因となる]
- (2) 本品を飲み込んだ場合には、水で口腔内を洗浄し、大量の水を飲むこと。必要に応じて、専門医の診断を受けさせること。

【使用上の注意】**

【使用注意】（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) 口腔内に傷、出血、炎症等の異常が認められる患者[症状を悪化させる恐れがある]

【重要な基本的注意】

- (1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者及び医療従事者は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- (2) ナトリウム摂取制限を必要とする患者への、ミントの使用は控えること。[誤飲の恐れがある]
- (3) 医療従事者は、保護メガネ及びマスクを着用すること。[眼球外傷、ウイルス感染、本品吸引の恐れがある]
- (4) 患者には保護メガネを着用させること。[眼球外傷の恐れがある]
- (5) 万一、本品が目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【その他の注意】

- (1) 眼鏡又はコンタクトレンズを着装している患者には、それをはずすよう勧めること。[噴出する本品により、眼鏡やレンズが汚れたり傷つけられる可能性がある]
- (2) 処置後 2～3 時間は、喫煙や飲食（コーヒー、ワインなど着色作用の強いものの摂取）を控えるよう指示すること。

【保管方法及び有効期間等】*/**

【保管の条件】

- (1) ボトルは、蓋をしっかりと閉め、湿気のない場所で保管すること。
- (2) 以下の場所に保管すること。
ミント：30℃以下
リコール及び PMTc+：25℃以下

【使用期限】

容器又は表示ラベルに記載の※使用期限までに使用すること。
[自己認証（外国製造業者データ）による。]
※砂時計マーク後の数字が使用期限を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：イー・エム・エス

E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com