

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 70680000

CR マスター

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造、種類】

本品は、両頭の専用インスツルメントである。使用部位及び使用目的に応じて、作業部の形状が異なる。



【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター
電 話 番 号：0800-222-8020（無料）
F a x 番 号：0800-222-6480（無料）
E - m a i l：e-customer@morita.com

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼（窒化アルミチタン処理）

【原理】

本品のハンドルを保持し、作業部で歯科材料又は歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布を行う。

【使用目的又は効果】

歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジン、歯科用支台築造材料、歯科用小窩裂溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用覆髄材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するため等に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) ハンドル部を把持する。
- (2) 作業部で歯科材料又は歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 破折、曲がりの原因となるため、過度な圧を掛けないこと。

【保守・点検に係る事項】

【消毒】

- (1) 防錆効果のある薬液で薬液消毒を行うこと。
- (2) 腐食の原因となるため、次亜塩素酸ナトリウム、フェノール等は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号：06-6380-2525

外国製造業者：オゾン OSUNG MND CO., LTD.

国 名：大韓民国