

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス 70893000

パラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】*

【形状・構造】

本品はピンク色の板状の歯科用パラフィンワックスである。

【寸法】

145×75×1.4 mm (L×W×H)

【体に接触する部分の主な組成】

成分	分量
パラフィンワックス	63%
マイクロクリスタリンワックス	28%
カルナバ蠟	4%
その他	5%

【原理】

高温で軟化させ、義歯床、咬合採得等に用いる。

【使用目的又は効果】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列、咬合採得等に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

義歯床の仮床

- (1) 本品を炎で加熱し、適度に軟化させ、ロール状に巻く。
- (2) 棒状になった本品を馬蹄形に形成し、基礎床に圧接する。
- (3) 必要に応じて、盛り足し又は削り、咬合床を形成する。
- (4) 咬合床の調整、人工歯の排列、ろう義歯の製作は通法どおり行う。

咬合採得

- (1) 本品を均等に軟化させたものを噛み合わせ、硬化後に口腔内から取り出す。
- (2) 本品の上に石こうを流し、石こう型とし咬合状態を確認する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本品は可燃性であるため、火傷しないよう注意すること。
また、過熱による火傷に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- (1) 火気厳禁の冷暗所に保管し、ひとつの場所に多量保管をしないこと。
- (2) 高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- (3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- (4) 換気の良い場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：リャンリン

LIANG LINN ENTERPRISE Co.,LTD.

国名：台湾

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号：0800-222-8020 (無料)

F a x 番 号：0800-222-6480 (無料)

E - m a i l：e-customer@morita.com