


歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

## プロキシディスク

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

本品は、表面が滑らかなディスクである。

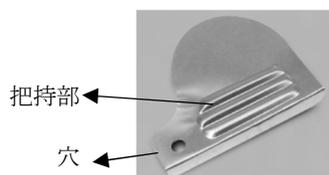

プレーン

#### 【寸法】

寸法：縦 22.8mm ×横 31.75mm

厚さ：76 $\mu$ m

#### 【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

#### 【原理】

隣接面コンタクトに挿入し、適度な圧を加え隣接面を形態修正する。

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- (1) 把持部の穴にフロスを通す。
- (2) ロッキングモーションで本品を隣接面コンタクトに挿入し、適度な圧を加えタイトな隣接面の余剰材などを取り除く。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 落下防止の為、必ず穴にフロスを通して使用すること。
- (2) 歯間が狭い場合は、ウェッジを使用し、歯をわずかに分離させておくこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 【洗浄】

- (1) 洗浄には、防錆剤を含有する歯科用洗浄剤を使用すること。
- (2) 使用後は、超音波洗浄を行うこと。
- (3) もらい錆を防ぐために、錆びている器具と一緒に洗浄しないこと。

#### 【消毒】

- (1) フェノールを含む消毒液を使用しないこと。

#### 【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：  
115～118℃ 30 分間  
121～124℃ 15 分間  
126～129℃ 10 分間
- (2) 139℃以上に加熱しないこと。
- (3) 本品は、ステンレス製以外の器具と一緒に滅菌しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：セントリックス Centrix Incorporated

国名：アメリカ合衆国

#### 【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com