

機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

## スーパーミキサー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### <使用方法>

- 再使用禁止。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 【形状・構造】

本品は、ミキシングエレメント部と固定用キャップからなる。大きさの違いにより、XS、S、Lの3種類がある。XSについては、専用の18Gニードルが付属する場合がある。

ミキシングエレメント部



固定用キャップ

(単位: mm)

種類名	先端部直径	全長	カラーコード
XS	4.2	50.1	イエロー
S	5.4	59.4	ピンク
L	6.5	67.6	グリーン

##### 【体に接触する部分の主な組成】

ポリプロピレン

18Gニードル（付属品）：ステンレス鋼、ポリプロピレン

##### 【原理】

2種類のペースト状歯科材料が、本品のミキシングエレメント部を通過することで練和が行われ、本品先端部より練和物が押し出される。

##### 【付属品】

18Gニードル（XS専用）

##### 【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料など）の練和及び注入に用いる。

##### 【使用方法等】

###### 【使用方法】

- ペースト状歯科材料が充填されたカートリッジをディスペンサーに装着し、カートリッジ先端のキャップを取り外す。
- 本品の固定用キャップにある突起とカートリッジ先端上部のV字型の溝とを合わせ、時計方向に90°回転させ、本品を取り付けて固定する。
- ディスペンサーの添付文書等に従って操作し、歯科材料の練和物を本品先端部より押し出す。

###### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品内の歯科材料が硬化している場合は、無理にディスペンサーを操作せず、新しい本品に取り替えること。

- 使用後（歯科材料を排出後）、本品は取り外さず、次回使用時まで装着しておくこと。[容器内で印象材が硬化するおそれがある]

##### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：セントリックス Centrix Incorporated

国名：アメリカ合衆国

##### 【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com