

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ 16184000
(歯科用マンドレル 35170000)

プロフィールカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- 本品のカップ及びコーンに使用されている材質（天然ゴム）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者
- 本品に使用されている材質（ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

＜使用方法＞

- 本品のカップ及びコーンに使用されている材質（天然ゴム）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- 本品に使用されている材質（ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- 再使用禁止（スクリータイプ用マンドレルは除く。）

【形状・構造及び原理等】

【種類】

本品には、CAタイプ、スクリータイプ及びスクリータイプ用マンドレルがある。

【体に接触する部分の主な組成】

CAタイプ：天然ゴム、真鍮（ニッケルめっき）

スクリータイプ：天然ゴム、真鍮

スクリータイプ用マンドレル：真鍮（ニッケルめっき）

【原理】

研磨材を塗布した本品を歯科用ハンドピースに取り付けて回転させることによって、歯面を清掃・研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 清掃もしくは研磨する部位に適したカップを選択する。
- (2) CAタイプを使用する場合は、ハンドピースに直接取り付ける。スクリータイプを使用する場合は、ハンドピースに直接取り付けるか、もしくはスクリータイプ用マンドレルに装着した後、ハンドピースに取り付ける。
- (3) カップに研磨材を付ける。
- (4) ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) CAタイプ、もしくは専用マンドレルを使用する場合は、ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) スクリータイプをハンドピースに直接取り付けて使用する場合は、確実に奥までスクリーを締め、動かないことを確認すること。
- (3) 予め口腔外で回転させて振れがないことを確認して使用すること。

- (4) スクリータイプを使用する場合は、モーターは必ず正（右）回転で使用する。[モーターを逆（左）回転させると、スクリーが緩み、本品が外れてしまうため。]
- (5) 2,000 rpm を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあるため、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な措置を施すこと。
- (2) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- (3) 保護メガネ、マスク等を使用すること。[目の損傷、飛沫感染を防ぐため。]

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- (1) スクリータイプ用マンドレルは、洗浄、消毒、滅菌後に水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
- (2) もらい錆びを防ぐため、錆びた器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

【洗浄・滅菌】（スクリータイプ用マンドレル）

- (1) 洗浄には、精製水、歯科用防錆剤を使用すること。
- (2) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- (3) 135℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：デントミット テクノロジー インク
DentMIT Technology, Inc.

国名：台湾

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com