

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

プロフィールブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- 本品に使用されている材質（ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

<使用方法>

- 本品に使用されている材質（ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[種類]

本品には、CAタイプ及びスクリュータイプがある。

[体に接触する部分の主な組成]

ナイロン、真鍮（ニッケルめっき）

[原理]

研磨材を塗布した本品を歯科用ハンドピースに取り付けて回転させることによって、歯面を清掃・研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- (1) 清掃もしくは研磨する部位に適したブラシを選択する。
- (2) CAタイプを使用する場合は、ハンドピースに直接取り付ける。スクリュータイプを使用する場合は、ハンドピースに直接取り付けるか、もしくは専用のマンドレールに装着した後、ハンドピースに取り付ける。
- (3) ブラシに研磨材を付ける。
- (4) ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨する。

[組み合わせて使用する医療機器]

- (1) スクリュータイプの本品は、必要に応じて「販売名：プロフィールカップ（届出番号：27B1X00109000333）」の「スクリュータイプ用マンドレール」と組み合わせて使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- (1) CAタイプ、もしくは専用マンドレールを使用する場合は、ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) スクリュータイプをハンドピースに直接取り付けて使用する場合は、確実に奥までスクリューを締め、動かないことを確認すること。
- (3) 予め口腔外で回転させて振れがないことを確認して使用すること。
- (4) スクリュータイプを使用する場合は、モーターは必ず正（右）回転で使用すること。[モーターを逆（左）回転させると、スクリューが緩み、本品が外れてしまうため。]
- (5) 2,000 rpm を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- (2) 保護メガネ、マスク等を使用すること。[目の損傷、飛沫感染を防ぐため。]

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- (1) もらい錆びを防ぐため、錆びた器具と一緒に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：デントミット テクノロジー インク
DentMIT Technology, Inc.

国名：台湾

[お問い合わせ先]

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

F a x 番号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l : e-customer@morita.com