

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

コンボグロス CA

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品には、作業部の形状の違いにより以下の形態があり、粒度の違いによりグリーン（仕上げ）、ライトグリーン（つや出し）の 2 種類がある。

(1) グリーン（仕上げ）



(2) ライトグリーン（つや出し）



【原理】

ダイヤモンド砥粒により研磨する。

【使用目的又は効果】

コンポジットレジンの研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- (2) 本品を回転させ、被研磨物に作業部をあて、研磨する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（製品の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 予め口腔外で回転させて振れがないことを確認して使用する。
- (4) 十分な注水下（50mL/分）で、発熱しない程度の圧で使用する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]

【保守・点検に係る事項】

【消毒】

- (1) アルカリ性の消毒剤は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- (2) 135℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：エデンタ エタブリッセメント
Edenta Etablissement

国名：リヒテンシュタイン

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com