


機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

## S P I ドリルエクステンション

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

本品には、外径の違いにより、次の 2 種類がある。

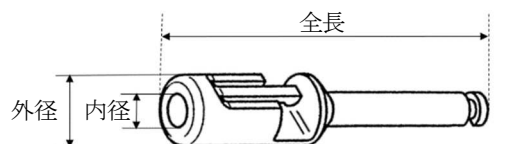

(単位：mm)

| 種類      | 内径  | 外径  | 全長   |
|---------|-----|-----|------|
| 3.5-4 用 | 2.4 | 3.7 | 26.0 |
| 4.5-6 用 |     | 5.0 |      |

#### 【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

#### 【原理】

本品に歯科用ドリルを装着してハンドピースへ接続することで歯科用ドリルを保持し延長する。

### 【使用目的又は効果】

歯科用ドリルを保持し、全長を延長するために用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- (1) 専用の歯科用ドリルを本品に装着する。
- (2) 本品をハンドピースに接続して使用する。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 装着する歯科用ドリルに指定されている回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 【清掃・洗浄】

- (1) 清掃にはナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。
- (2) 塩素含有量が高い洗浄剤・消毒剤、及びシュウ酸入りの洗浄剤・消毒剤は使用しないこと。

#### 【滅菌】

- (1) 使用前に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：  
115～118℃ 30 分間  
121～124℃ 15 分間  
126～129℃ 10 分間

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG  
Thommen Medical AG

国名：スイス

### 【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号：0800-222-8020（無料）

F a x 番 号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l：e-customer@morita.com