

ピーマルチソフト (PC1)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等 *

- (1) 形 状 : リキッド状
- (2) 主成分 : 酸化アルミニウム、油脂類、赤色顔料、
乳化剤等

2. 仕様 *

水溶性のため、金属とレジンの境界に黒ずみがでにくい。研磨後の洗浄が非常に容易。光沢性に富み、特にレジンの効果を発揮する。

【使用目的又は効果】 *

本材は補綴物の研削・研磨に用いる。

【使用方法等】 *

1. 使用環境条件 *

- 下記の条件にて使用すること。*
- (1) 周囲温度 : 10 ~ 40℃ *
- (2) 相対湿度 : 30 ~ 75%RH (結露しないこと) *
- (3) 気 圧 : 700 ~ 1,060hPa *

2. 使用方法 *

硬質レジン、各種メタル、デンチャーなどの最終研磨に用いる。パフ、フェルトなどにつけて使用する。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意 *

研磨の際は、必ず防塵対策を行ってから作業を開始すること。対策を怠ると、粉塵の吸引などにより健康を害するおそれがある。*

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意 *

- (1) 火気もしくは高温体との接近は避けること。
- (2) 本材を口に入れたり、人体に使用しないこと。誤って飲み込んだ場合は、吐かせた後大量の水を飲ませること。
また、目に入った場合はこすらず流水で洗い流すこと。
いずれも必要に応じて医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】 *

1. 保管条件 *

- 下記の条件にて保管すること。*
- (1) 周囲温度 : -10 ~ 50℃ *
- (2) 相対湿度 : 10 ~ 85%RH (結露しないこと) *
- (3) 気 圧 : 700 ~ 1,060hPa *

2. 保管方法

- (1) 直射日光の当たらない場所に保管すること。
- (2) 保管時は容器の蓋をしっかりと閉めること。
- (3) 長期間の保存等により変質・硬化、油分の分離がみられる場合は使用を控えること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 *

株式会社モリタ東京製作所

電話番号 048-723-2621

お客様専用フリーダイヤル 0120-131-557

受付対応時間 9:00~12:00、13:00~17:00**
(土・日・祝日を除く、弊社営業時間)**