

アドプレップ

【禁忌・禁止】

下記患者には適用しないこと。

・酸化アルミニウムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者

・慢性の気管支炎、喘息、その他呼吸器疾患のある患者

[症状を悪化させる可能性がある]


口腔内で使用しないこと。

[口腔内を傷つけるおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

〈本体〉**

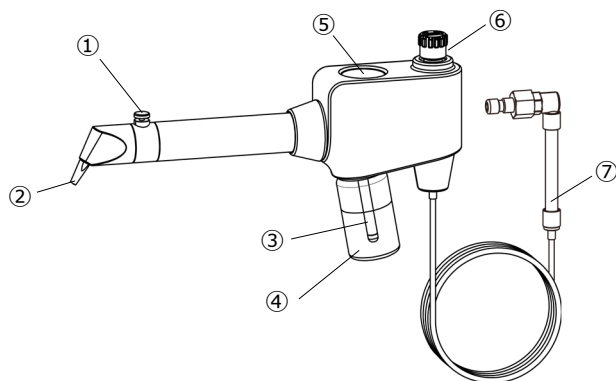

①ボタン

②ノズル

③パウダーピックアップチューブ

④パウダータンク

⑤圧力計

⑥圧力調整弁

⑦チューブ

〈パウダー〉

アルミナ 粒径 50 μ m, 白色

〈付属品〉

クリーニングワイヤー

ノズル着脱用レンチ

パウダータンク (専用アルミナパウダー入り)**

格納用ホルダー

専用アルミナパウダー 200g (別売)**

2. 動作原理

本品は、圧力計及び圧力調整弁により噴射圧の調整を行い、歯科用ユニット等から供給されるエア源により、パウダータンクに充填されたパウダーを噴射し、補綴物等の研削や表面の粗面化を行う。

3. 本体寸法及び質量

(1) 寸法 : 全長 196 mm

(2) 質量 : 約 210g

4. 接続仕様**

(1) 入力エア圧力 : 0.5 MPa 以下**

(2) エアの状態 : 異物や水分を含まないエアであること。 **

(3) 給気ジョイント形状 :

専用ジョイント**

※ジョイント形状の異なるエア供給源の場合は、ジョイントをエア供給源のジョイントに変換し接続する **

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削や表面の粗面化に用いる。

【使用方法等】

1. 使用環境条件

下記の条件にて使用すること。

(1) 周囲温度 : 10 ~ 40℃

(2) 相対湿度 : 30 ~ 75%RH (結露しないこと)

(3) 気 圧 : 700 ~ 1,060hPa

2. 使用方法

(1) チューブをエア供給源に接続する。 **

(2) 噴射エア圧を調整する際は圧力計を確認しながら、圧力調整弁のツマミを回して調整を行う。 *

(3) 付属のパウダータンク (専用アルミナパウダー入り) の蓋を取り外し、本体に取り付ける。 **

(4) 本体を握り、ボタンを押すと、パウダーが噴射され、ボタンを離すと停止する。 **

(5) タンク内のパウダーが無くなった場合、アルミナパウダー 200g (別売) をパウダータンクへタンクの所定の位置まで入れ使用する。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 本品のノズルを顔や目に向けないこと。
- (2) パウダー詰まりや故障の原因となるため、歯科用ユニットに接続時、給水接手には絶対に接続しないこと。
- (3) 正常に機器を使用するため、本品は使用前に必ず清掃すること。
- (4) チューブ接続部からエアリー漏れがないことを確認すること。
- (5) パウダータンク内のパウダーに汚れや異物混入が無く、凝集が無い乾燥したパウダーを使用すること。
- (6) 乾燥したエアリーを使用し、酸素、可燃ガス、毒性ガスは使用しないこと。また入力エアリー圧は0.5MPa以下で使用する。
- (7) パウダーピックアップチューブは確実にパウダータンクに挿入されており、パウダーの中に常に入っている状態で使用する。
- (8) 先端のノズルは確実に本体に固定されていることを確認すること。*
- (9) 故障の原因となるため、専用のパウダー以外を使用しないこと。*
- (10) 使用前にパウダーの噴射を目視で確認すること。*

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者および医療従事者は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
2. 目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用すること。
3. 呼吸による粉塵の吸入を防ぐため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件

下記の条件にて保管すること。

- (1) 周囲温度：-10～70℃
- (2) 相対湿度：10～85%RH（結露しないこと）
- (3) 気圧：700～1,060hPa

余剰のパウダーは本体からパウダータンクを外し蓋をして保管すること。

2. 耐用期間

6年間。（自己認証（当社データ）による）

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

【保守・点検に係る事項】

1. 医療機器の使用、保守の管理責任は、使用者（医療機関、病院、診療所、技工所）側にある。
2. 日常の点検および定期保守点検は以下の項目に従って行う。
下記項目の点検を実施し、異常がある場合は交換もしくは修理依頼を行うこと。

〔使用者による保守点検事項（日常点検）〕

点検内容	点検時期	点検事項
本体	使用前	各部に異常はないか
パウダータンク	使用前	ひび、亀裂、キズ、変色などの異常がないか** エアリー漏れなどの異常がないか
チューブ*	使用前*	ひび、亀裂、キズ、変色などの異常がないか** エアリー漏れなどの異常がないか*
圧力計	使用前	エアリー供給前はゼロを指すこと エアリーを供給したらゲージが動くこと、およびMax値を超えないこと
ノズル	使用后	パウダーの排出を行ったか

詳細は取扱説明書を参照すること。

〔使用者による保守点検事項（定期保守点検）〕

なし

〔業者による保守点検事項〕

定期点検を弊社または弊社の指定する業者に依頼すること。

点検内容	点検時期	点検事項
ノズル	1年に1回	適切な噴射が出来ているか
パウダータンク	1年に1回	ひび、亀裂、キズおよび変色などの異常がないか**

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社モリタ東京製作所

電話番号 048-723-2621

お客様専用フリーダイヤル 0120-131-557

受付対応時間 9:00～12:00、13:00～17:00

（土・日・祝日を除く、弊社営業時間）