

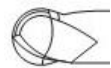
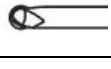
歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

DM CAD/CAM ミリングバー

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

(単位：mm)

形状・型番	仕様
型番：DM-DLC2.0	作業部形状 
	作業部径 $\phi 2.0$
	軸径 $\phi 4.0$
	全長 50
	ネック長 16
	コーティング DLC
型番：DM-DLC0.8	作業部形状 
	作業部径 $\phi 0.8$
	軸径 $\phi 4.0$
	全長 50
	首下長 12
	コーティング DLC
型番：DM-DLC0.4	作業部形状 
	作業部径 $\phi 0.4$
	軸径 $\phi 4.0$
	全長 50
	首下長 6
	コーティング DLC
型番：DM-DIA2.0	作業部形状 
	作業部径 $\phi 2.0$
	軸径 $\phi 4.0$
	全長 50
	首下長 16
	コーティング ダイヤモンド
型番：DM-DIA0.8	作業部形状 
	作業部径 $\phi 0.8$
	軸径 $\phi 4.0$
	全長 50
	首下長 12
	コーティング ダイヤモンド
型番：DM-DIA0.4	作業部形状 
	作業部径 $\phi 0.4$
	軸径 $\phi 4.0$
	全長 50
	首下長 6
	コーティング ダイヤモンド

[材質]：タングステンカーバイド鋼

【使用目的又は効果】

各種歯科用 CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

【使用方法等】

[併用する医療機器について]

本品と併用する装置及び材料は次の通り。各製品の使用方法は付属の添付文書及び取扱説明書を参照すること。

① CAD/CAM 装置

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「歯科用 CAD/CAM マシン DWX-51D」(届出番号：22B3X10006000021)

「歯科用 CAD/CAM マシン DWX-4」(届出番号：22B3X10006000050)

[使用方法]

- 1) CAD/CAM 装置に付属の添付文書及び取扱説明書に従い、本品を CAD/CAM 装置に取り付けること。
- 2) WorkncDental から加工データを送信して加工を行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 最高許容回転速度 30,000min⁻¹ を超えて使用しないこと。
- 2) 他社から販売されている DWX-51D, DWX-4 には使用しないこと。
- 3) 加工用データは、必ず WorkncDental で作成されたデータを使用すること。(不適切な加工条件で加工した場合、加工物の不良や本材の変形、破損等のおそれがあります。)
- 4) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- 5) 本材の加工、改造は行わないこと。
- 6) 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。
- 7) 本材は刃物であるため、取扱いには充分注意すること。
- 8) ハイブリッド型レジン材料の加工は、必ずコーティングがダイヤモンドの本材を使用し、DLC コーティングの製品は使用しないこと。
- 9) 2 種類以上の材料を加工する場合は、1 材料につき本材を 1 セット準備し、同一セットで異種材料を加工しないこと。(加工物に異種材料の切削屑が付着すると、加工物の不良の原因になるおそれがあります。)
- 10) 次の行為は、破損の原因になるため行わないこと。
 - ・刃先を持つ。
 - ・刃先に衝撃を加える。
 - ・刃先を変形させる。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 本品は汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所に保管・管理すること。
- 2) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- 3) 「もらいさび」が発生するおそれがあるため、錆びている製品と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 金属製のブラシ等で清掃しないこと。
- 2) 水分を含んだ布等で清掃しないこと。
- 3) 工業用工具に用いられるオイル等は、加工する歯科用修復物に付着する恐れがあるため塗布しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：(株)モモセ歯科商会

住所：〒543-0054

大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6 番 35 号

電話番号：06-6773-3333

緊急連絡先：(株)モモセ歯科商会 推進事業部 ASU

電話番号：06-6773-4175

ファックス：06-6773-0927

製造業者：オーエスジー株式会社

販売業者の連絡先：(空欄です。使用者が下に記載してください)