

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000) (歯面研磨材 (70904000))

酸化アルミナ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

名称	材質	性状	色
酸化アルミナ (27 ミクロン)	酸化アルミニウム	粉末	白
酸化アルミナ (50 ミクロン)	酸化アルミニウム	粉末	白
酸化アルミナ (90 ミクロン)	酸化アルミニウム	粉末	薄茶

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、金属・レジン・歯垢・歯石・接着材・ポーセレン等の研削および歯面（根管内）清掃等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 専用サンドブラスター（別売）と併用する場合
用途に応じて選択した本品を適量取りだします。
専用サンドブラスターのジャーに充填し、使用します。
- 2) トランスルーマポストブラシ（別売）と併用する場合
 - ① トランスルーマポストブラシを水で濡らし、本品を適量付着させます。
 - ② トランスルーマポストブラシを支台築造接着前の根管内に挿入し、正回転で低速（800rpm 以下）にて回転させて歯面清掃します。

※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

取り出した後の本品は、本品の容器に戻さないこと。
専用サンドブラスターのジャーに充填した本品は、専用サンドブラスター付属の穴なしジャー（パウダー保管用）等の密封できる容器に入れて保管して、早めに使い切るようにすること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 誤飲には十分注意すること。
 - ② 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵除去装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないようにすること。
 - ③ 保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散した本品から眼・鼻・口等を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 使用後は本品を湿気や汚染から保護するために、密封できる容器にて保管すること。
- 2) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造業者 ZEST ANCHORS LLC
(ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国 アメリカ合衆国