

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材（70908000）

オーソプロフィー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

種類	材質	形状	色
SA85 ミクロン	酸化アルミニウム	粉末	白

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は金属・レジン・歯垢・歯石・接着剤・ポーセレンの研削に用いる粉末である。

【使用方法等】

用途に応じて選択した本品「オーソプロフィー」を適量取りだします。

専用サンドブラスターのジャーに充填し、使用します。

※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

取り出した後の本品「オーソプロフィー」は本品の容器に戻さずに、専用サンドブラスターの穴なしジャー（パウダー保管用）等の密封できる容器に入れて保管して、早めに使い切るようにして下さい。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ①誤飲には十分注意すること。
- ②本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵除去装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないようにすること。
- ③保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散した本品から眼・鼻・口等を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 使用後は本品を湿気や汚染から保護するために、密封できる容器にて保管すること。
- 2) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造業者 ZEST ANCHORS LLC
(ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国 アメリカ合衆国