

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)
マイクロエッチャーⅡ

*酸化アルミナ 50 ミクロン、シリジエット パウダーは再使用禁止


【禁忌・禁止】

*酸化アルミナ 50 ミクロン、シリジエット パウダーは再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造等]

<マイクロエッチャーⅡ>

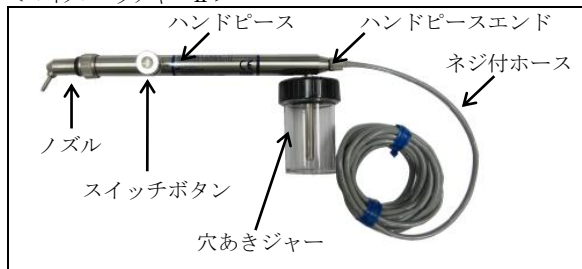

<酸化アルミナ (50 ミクロン)>

材質: 酸化アルミニウム、色: 白

*<シリジエット パウダー (30 ミクロン)>

材質: 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素
色: 白

本品は、組み合わせによって同梱されない製品があり、同梱されている製品のリストについては容器・被包の表示に記載。

原理: 本品は受動型機器であり、歯科用ユニットや本品専用マイクロエッチ・ブロー缶などにより供給されるエア源により、専用ジャーに充填された粉末を噴射する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いたり、補綴物等の表面を粗面にすることで、接着性を付与・強化する。

【使用方法等】

<組み立て方法>

- ①ホースネジ部をハンドピースエンドに時計方向に回しながらしっかりと装着します。
- ②ジャー容量の 1/4 ~ 3/4 を目安に、パウダーを入れ、ハンドピースに装着します。

<エア源との接続方法>

- ①歯科用ユニットとの接続
※取り付けの際に専用金具が必要になる場合があります。
- ②マイクロエッチ・ブロー缶との接続
※詳細は、取扱説明書を必ずご参照ください。

*<操作方法>

- ①ノズルのネジ部をゆるめ、使用部位にあわせた角度にノズル先端を合わせ、ネジ部を閉めます。
- ②ハンドピースをペングリップに保持します。
- ③ノズル先端を目的に合わせ、対象物から 2 ~ 10 mm 離します。対象物との距離が離れると、処理面積が広がります。
- ④親指の腹側にて、スイッチボタンをコントロールし、押すと始動、離すことにより停止します。
- ⑤表面に光沢がなくなったら表面サンドブラスト処理完了です。

※シリジエット パウダーと併用する場合、使用方法等については「シリジエット パウダー」(医療機器届出番号: 13B1X10394010041)の添付文書に従ってください。

- ・本品とエア源との取り外し
※詳細は、取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 使用前に必ず本品を作動させること。
異音や異常な振動を感じたら使用を取りやめること。

※噴射試験を行い、異常がなければ使用すること。

- ②金具は確実に接続すること。
しっかり接続されていないと、使用中に外れる恐れがあります。
- ③エア圧は、2.6 ~ 5.0 気圧にて使用すること。
- ④本品の作動が完全に停止してから、本品とエア金具の脱着を行うこと。
- ⑤非サンドブラスト部位をドライフォイルのような薄いフィルム状のもので、保護すること。
- ⑥研磨材の過度の噴射に注意すること。
ポーセレン等の場合、過度にサンドブラストされることがあります。
- ⑦ウォーター金具には絶対に接続しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品のノズルを顔や目に向けないようにして下さい。
- ②本品をご使用される場合は、常に保護メガネをご使用下さい。
- ③本品の操作は、集塵器内か噴射された研磨材を吸引しながらご使用下さい。
- ④空気中に飛散した研磨材により目や鼻や喉を傷めたり、眼鏡を傷つけることがあります。
- ⑤飛散した研磨材により光学機器を含めた器械類の故障の原因になることもあります。

2) 重要な基本的注意

- ①歯科用ユニットに接続時、ウォーター金具には絶対に接続しないでください。
- ②本品の使用により、研磨材が目に入った場合は、多量の水で洗い流し、必ず眼科医の診断を受けて下さい。
- ③口腔内で使用する際は、必ずラバーダムをご使用下さい。
- ④粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵除去装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ①ご使用後は、本品をエア源またはマイクロエッチ・ブロー缶から、必ず外して下さい。
- ②研磨材を湿気や汚染から保護するために、毎使用後、穴あきジャーの研磨材は、穴なしジャーに移し替えて保管して下さい。
- ③水のかからない場所に保管して下さい。
- ④気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管して下さい。
- ⑤傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等に対する安定状態に注意して下さい。

* [有効期間等]

シリジエット パウダーは、包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

【保守・点検に係る事項】

- ①機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- ②暫く使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常に且つ安全に作動することを確認すること。
- ③強い衝撃を与えないこと。落下させないように注意すること。

【消毒・滅菌方法】

- ①使用後は速やかに器具に付着した唾液等を除去すること。
- ②ハンドピース部は、外層を拭き、十分乾燥させてから保管して下さい。
- ③ノズル部は、外層を拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌(132℃、15分以上)すること。
乾燥工程は行わないこと。

- ④薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。(本品を薬液につけることはお避

取扱説明書等を必ずご参照ください

ください。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC
	(ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国

取扱説明書等を必ずご参照ください