

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材（70908000）
プロフィンハンド

【形状・構造及び原理等】



種類	LTA-150	LTA-S100	LTA-50	LTA-S30
CODE	赤	緑	黄	白
ダイヤモンド粗さ	150	100	50	30
形態				

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研削等に用いる器材である。

【使用方法等】

＜装着方法＞

用途に合わせて選択したチップを適用部位に合わせて角度付けをして、本品のヘッド部にまっすぐ差し込みます。

＜取り外し方法＞

チップを本品からまっすぐに引き抜きます。

※本品軸部がヘッド背面から出ている場合は、軸部を押してから引き抜きます。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。変形する可能性があります。
- ②ケミクレープ滅菌やE O Gによる滅菌もしくは薬剤による消毒は行わないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①本品の使用にあたっては、外観上の損傷各部位の緩み等がないか確認を行うこと。
- ②感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は速やかに洗浄を行うこと。洗浄は中性洗剤等を用いて柔らかいスポンジ等を使用すること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は本品の表面が損傷するので、使用しないこと。洗浄後、洗剤等の残留がないように水洗を十分に行うこと。水洗を十分に行わないと高圧蒸気滅菌により、変色または腐食する場合があるので注意すること。
- 2) 汚染除去のために用いる洗浄剤は、歯科用防錆洗浄剤など、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するこ
- 3) 超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- 4) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 5) 薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼすことがある。
次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒剤、グルタラル製剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼントニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は、変色あるいは腐食する恐れがあるので使用しないこと。

【滅菌条件等】

- ・洗浄後、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレープ滅菌（135℃滅菌可能）すること。

※ケミクレープ滅菌やE O Gによる滅菌もしくは薬剤による消毒は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Dentatus AB (デンタタス エイビー社)
製造国	スウェーデン