

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
デュアルシリンジミキシングチップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある場合は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品はデュアルシリンジに装着する注入器具を有した練成器具であり、用途に応じて 5 種類の形状がある。

種類	スタティックチップ	ミックス用チップ
形状 サイズ (mm)		
	全長: 39.7mm	全長: 33.4mm
	外径: 2.5mm 内径: 0.8mm	外径: 2.5mm 内径: 2.2mm
用途	直接修復物や患部等に適用できます。	先端に口腔内用チップまたは根管用チップを装着します。

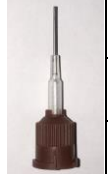種類	ディスペンシングチップ
形状 サイズ (mm)	
	全長: 48.93mm
	外径: 0.9mm 内径: 0.6mm
用途	先端のニードルから直接患部等に適用できます。

種類	口腔内用チップ	根管用チップ
形状 サイズ (mm)		
	全長: 9.5mm 外径: 1.8mm 内径: 1.2mm	全長: 11.3mm 外径: 1.1mm 内径: 0.9mm
	ミックス用チップ装着時の 全長: 42.9mm	ミックス用チップ装着時の 全長: 44.7mm
用途	ミックス用チップに装着して、 歯科材料を修復物や患部等に適用します。	ミックス用チップに装着して、 歯科材料を根管内等に適用します。


材質：ポリプロピレン、ステンレス鋼

【使用目的又は効果】


デュアルシリンジに装着し、歯科材料を押し出すことにより、練和又は混和された材料が注出される。

【使用方法等】


1. 必要に応じて、本品を選択します。
2. 本品の接続部の突起は、ペースト孔の位置と一直線上に並んでいる状態にしてください。

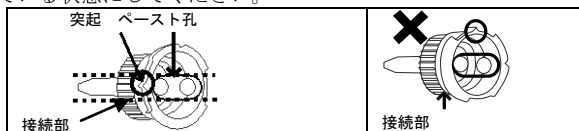

3. 本品の接続部の突起を、デュアルシリンジの溝に合わせて奥まで押し込み、接続部を時計回りに 1/4 回転させて確実に装着します。

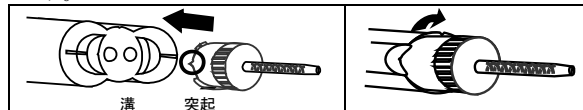

4. ミックス用チップは、用途に応じて、先端に口腔内用チップまたは根管用チップを取り付けます。口腔内用チップおよび根管用チップは回転させることができます。

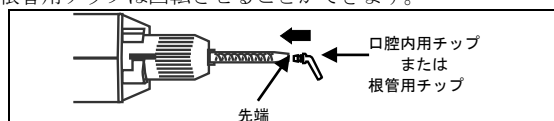

5. ディスペンシングチップの先端は、適用箇所に応じて曲げることができます。

6. 本品の取り外しは、接続部を反時計回りに 1/4 回転して突起とデュアルシリンジの溝を合わせ、前方に引き抜きます。

**【使用方法に関連する使用上の注意】**

1. 使用前に、本品に異常がないことを確認し、シリンジに確実に取り付けられていることを確認すること。
2. 練和する歯科材料の指定する練和（硬化）時間より前に、本品の操作を終了すること。
3. 使用する歯科材料の製造者の指示に従って、シリンジの操作を行うこと。
4. 口腔内用チップまたは根管用チップを装着する時、回転させる時は先端を保持せず、変形しないようにすること。

【使用上の注意】**【使用注意】**

- 1) 無理な角度、過度の加圧での使用はしないこと。

【重要な基本的注意】

- 1) 本品は再使用しないこと。
- 2) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある場合は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

- 1) 直射日光を避け、常温（但し、結露しないこと。特に水ぬれに注意すること）にて、保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	BISCO, Inc.（ビスコ インク社）
製造国	アメリカ合衆国