

**歯科材料 08 歯科用石膏及び石膏製品**  
**一般医療機器 歯科用樹脂系模型材（34811000）（歯科用練成器具（70682000））**  
**EZ-COPY ファストンダイ**

再使用禁止（ミキシングチップ）

**【禁忌・禁止】**

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある場合には使用しないこと。
2. ミキシングチップは、再使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

本品は以下の構成成分があり、記載の成分を含みます。

構成成分	性状	形状	成分
ベース	ペースト	カートリッジ	ポリビニルシロキサン、二酸化ケイ素、その他
キャタリスト	ペースト		

付属品：ミキシングチップ

**【品目仕様等】**

項目	仕様
操作時間	30 秒間
硬化時間	2 分

**【使用目的又は効果】**

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

**【使用方法等】**

1) 使用準備

- ① 印象採得後に正確に印象が採得されているかを確認します。
- ② 印象材の製造販売業者の指示に従って印象を消毒または滅菌を行います。
- ③ 歯科用シリコン印象材を用いた印象には、シリコン印象材の製造販売業者の指示に従って、汎用のスプレー式分離材をスプレーします。  
(歯科用アルギン酸塩印象材を用いた場合には、分離材を適用する必要はありません。印象材に残っている水滴を除去して下さい。)

2) カートリッジの汎用カートリッジ用ディスペンサーへの装着

- ① カートリッジを、別売の汎用カートリッジ用ディスペンサーの製造販売業者の指示に従って、装着します。
- ② 本品のキャップを反時計方向に 90 度回転させ、手前に引いて、カートリッジから外し、ペーストをミキシングパッドに 3mm ほどの長さで押し出し、均一であることを確認します。

3) 本品の注入

- ① ミキシングチップの取付部周縁にある切れ込みと、カートリッジ側取付部にある切れ込みと合わせ、押し入れ、時計方向にロックするまで回転させます。
- ② 本品を注入する前に、採取した印象をバイブレーター上に置き、バイブレーターを作動させます。  
※バイブレーターの使用により、ペーストの流動性を向上させ、気泡混入を最小限に抑えることができます。
- ③ 本品を印象面の深い部分から印象が満たされるまで継続して注入します。気泡混入を減らすため、ミキシングチップ先端は注入しているペースト内に維持して注入し続けてください。

4) 本品の取り外し

- ① 本品の硬化後、印象から模型を取り外します。模型は必要に応じて技工用ナイフまたは歯科用バー等で調整してください。

**【使用方法に関連する使用上の注意】**

- 1) 歯科用シリコン印象材を用いた印象に本品を注入する際には印象前に、シリコン印象材の製造販売業者の指示に従って、汎用のスプレー式分離材をスプレーすること。  
シリコン印象材に汎用のスプレー式分離材を使用した場合には、スプレー後、本品を使用する前に適合性を確認すること。
- 2) 最深部へのペースト注入の際に、気泡混入を最小限に抑えるため、別売の汎用ノズルをミキシングチップ先端部に装着、または歯科用練成器具（販売名：ECOシリンジ2）などを併用すること。

- 3) 印象は血液、唾液などを十分洗浄した後、必要に応じ、消毒または滅菌を行うこと。
- 4) ミキシングチップをカートリッジに装着後、全て準備が整うまではペーストを注出しないこと。
- 5) カートリッジにミキシングチップを装着する前に、必ずペーストの試し出しを行うこと。
- 6) ペーストが注出できない場合には、硬化した部分を取り除いてから使用すること。

**【使用上の注意】**

1) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた場合は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ② 本品を、目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合はすぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けること。
- ③ 本品は硬化後、インスツルメントや手指から簡単に剥がすことができるが、硬化前に衣類などに触れないように注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

〔保管方法〕

- 1) 直射日光、高温多湿を避け 20～25℃の暗所に保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔使用期間等〕

- 1) 包装に使用期限（西暦 4 桁-月 2 桁-日 2 桁表示）を記載。
- 2) 記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Amco, Inc. (アムコ インク)
製造国	大韓民国