


機械器具 65 歯科用充填器
 一般医療機器 歯科用充填器 (70680000)
TDV コンタクト プラス ゴールド

【禁忌・禁止】

本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、先端の遠心窩洞用または近心窩洞用のチップを操作し、コンポジットレジンを充填するために用いる。ラージとスモールの2種類がある。

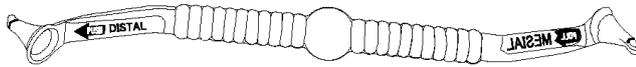

↑遠心窩洞用チップ

近心窩洞用チップ ↑

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

本品は、高温多湿・直射日光を避け、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

【清掃、洗浄、滅菌条件等】

・使用後は中性洗剤を使って洗浄すること。

・オートクレーブ滅菌(126℃、16分)を行うこと。オートクレーブ以外の滅菌方法は製品が破損する可能性があるため避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社モリムラ

電話番号

03-5808-9350

製造国

ブラジル

製造業者

TDV DENTAL LTDA

(ティーディーブイ デンタル エルティーディーイー社)

種類	先端の形状	
	遠心窩洞用チップ	近心窩洞用チップ
ラージ		
スモール		

材質:ポリスルホン

【使用目的又は効果】

Ⅱ級窩洞コンポジットレジン充填及び形成器具として用いる。

【使用方法等】

- (1)窩洞に適したマトリックスとウエッジを装着します。
- (2)修復面のサイズと位置を確認し、適したチップを選択します。
- (3)チップの先端が包み込まれる程度の量のフロアブルレジンを充填します。
- (4)MO 窩洞は近心窩洞用チップを、OD 窩洞は遠心窩洞用チップを選択し、チップ先端部を窩底部に接触するまで挿入します。近心窩洞用は近心側、遠心窩洞用は遠心側に向かって矢印表示があり、その方向に圧接します。
- (5)適度な力を加えながらチップを固定し、光照射を行います。
- (6)チップを窩洞から引き抜き、通法に従い引き続き充填を行います。

【使用上の注意】

- ・本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合にはただちに使用を中止すること。