

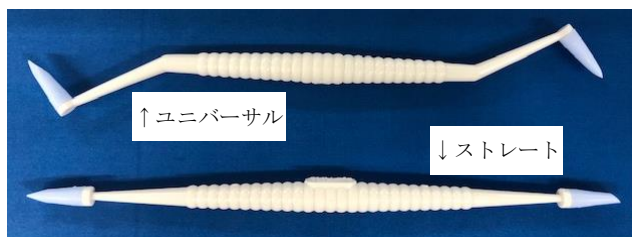
機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 (70680000)
T D V エステティックプラス

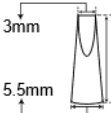
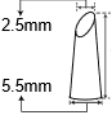
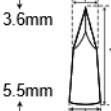
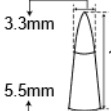
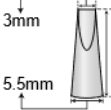
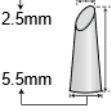
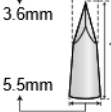
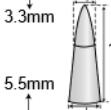
【禁忌・禁止】

本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ハンドルとチップから構成され、ハンドルの先端にチップを装着する。ハンドルの形状はユニバーサル、ストレートの 2 種類がある。チップの形状はフラット、シングルエッジ、ダブルエッジ、ポイントの 4 種類があり、それぞれソフトとハードがある。



チップの形状・種類		色	材質
	ソフト・フラット	ホワイト	シリコーン樹脂
	ソフト・シングルエッジ		
	ソフト・ダブルエッジ		
	ソフト・ポイント		
	ハード・フラット	ブルー	
	ハード・シングルエッジ		
	ハード・ダブルエッジ		
	ハード・ポイント		

ハンドルの材質:ポリスルホン

【使用目的又は効果】

コンポジットレジン形成器具として用いる。

【使用方法等】

- (1)修復物の形態に応じて、ハンドルとチップを選択します。
- (2)ハンドルの先端にチップを取り付けます。
- (3)チップを回転させながら、適切な位置にセットします。
- (4)軽いタッチでコンポジットレジンの形成を行います。ブルーのハードチップから使用し、ホワイトのソフトチップで仕上げを行います。

【使用方法における使用上の注意】

本品は、パッカブルコンポジットレジン、フロアブルレジン、アマルガム、グラスアイオノマーセメント、アクリルレジンの形成には使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合にはただちに使用を中止すること。
- ・本品の誤飲を防止するため、ラバーダムを使用すること。

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

本品は、高温多湿・直射日光を避け、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

【清掃、洗浄、滅菌条件等】

- ・レジンの非付着性を保つため、使用後はチップをアルコールで拭き取り、付着したコンポジットレジンを取り除くこと。
 - ・使用後のハンドルは、中性洗剤を用いて洗浄すること。
 - ・オートクレーブ滅菌(126℃、16 分)を行うこと。
- 滅菌によりチップの色がわずかに変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造国 ブラジル
製造業者 TDV DENTAL LTDA
(ティーディーブイ デンタル エルティーディーエー社)