

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム (11155010)

R&S デンタルダム ノンラテックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Four D Rubber Co Limited (フォー デーイー ラバ ー カンパニー リミテッド社)
製造国	英国

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

種類	寸法	厚さ	色調	原材料
ノンラテックス シート	6×6 インチ	ミディアム (0.18-0.23mm)	ブルー	合成ゴム、その他
		ヘビー (0.23-0.28mm)		

※表面に白い粉状の斑点等が見られる場合がありますが、
白い粉はタルクです。また、製造上、縁の一部にシミのような
ものが見られる場合があります。
いずれの場合も、品質に問題はなく使用できます。

2. 原理

ラバーダムパンチで穴をあけ、治療歯に被せて歯を孤立させることで
手術野を鮮明にする。唾液や細菌による汚染を防ぎ、薬剤や器材等
の誤飲を防ぐことができる。

【使用目的又は効果】

歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するために用いる。

【使用方法等】

- ラバーダムパンチで本品に穴をあけ、歯牙に被せる。
- 露出させた歯の歯頸部にラバーダムクランプ等を装着することで本
品を固定し、手術野を隔離する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

薬品や溶剤等によっては、本品に付着すると膨潤したり浸透したりす
る場合があるため、注意して使用すること。

【使用上の注意】

【使用注意】

再使用しないこと。

【重要な基本的注意】

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等
の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせ
ること。
- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等
の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けるこ
と。
- 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保
護マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光、高温多湿を避けた、5～45℃の換気の良い暗所に保管す
ること。
銅や銅合金は本品に着色を起こすため、本品の近くに保管しないこと。
本品に油や溶剤、グリースを接触させないようにすること。〔劣化の
原因となるため〕

【有効期間】

包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。