

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科矯正用プライヤー（33209000）
グレーシア・ディボンディングプライヤー

【禁忌・禁止】

本品はニッケル及びクロムを含有しています。ニッケル及びクロムに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある歯科医療関係者及び患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼（ニッケル、クロム含有）

<原理>

小型のペンチで、歯列矯正用ブラケットを保持し、撤去するために使用する。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、歯列矯正用ブラケットを保持し、撤去するために用いる。

【使用方法等】

歯列矯正用ワイヤーを取り外した後にブラケットの撤去を行う場合

1. 本品の先端をブラケットのサイズに広げた後、ブラケットに位置させる。
2. ブラケットのベース部分からしっかりと保持する。ブラケットの上部だけを保持することはブラケットの破損につながるのので、注意すること。
3. ブラケットを左右交互にそっとねじりながら歯面等から撤去する。

歯列矯正用ワイヤーを結紮した状態のブラケットを撤去する場合

1. 本品の先端をブラケットのサイズに広げた後、ブラケットに位置させる。
2. 本品先端の溝にワイヤーを位置させる。
3. ブラケットのベース部分からしっかりと保持する。ブラケットの上部だけを保持することはブラケットの破損につながるのので、注意すること。
4. ブラケットを左右交互にそっとねじりながら歯面等から撤去する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ① ブラケットを撤去する際、ブラケットのベース部分からしっかりと保持すること。[ブラケットの上部だけを保持することはブラケットの破損につながるため。]

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 本品の使用にあたっては、滅菌および消毒された状態で使用すること。
- ② 本品の使用前に破損、ヒビ、傷、腐食等がないか確認すること。これらがある場合には、使用を中止すること。
- ③ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用にあたっては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認を行うこと。
- ② 使用時に本品に過剰の力を加えないこと。[破損、曲がりなど

の原因となるため。]

- ③ ニッケル及びクロムに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある歯科医療関係者及び患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 高温多湿、直射日光を避けた室温に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

[清掃・消毒方法]

- ① 本品をエタノールで消毒し、拭掃する。
- ② 薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- ③ アンモニアや漂白剤等の使用は避けること。

[滅菌方法]

- ① 本品を滅菌ポーチに入れ、オートクレーブ滅菌（121～132℃、30 分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	エッチディー カンパニーリミティッド (HT Co.,Ltd.)
製造国	大韓民国