

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000) (歯科用マンドレル (35170000))
Z T ポリッシャー

ワンステップ、ディスクは再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. ワンステップ、ディスクは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1.ツイスト

種類	ミディアム	ファイン
材質	研磨部:ダイヤモンド、TPU マンドレル:金メッキ真鍮	
推奨回転数	3,000~8,000rpm	

2.ワンステップ(単回使用)

種類	ディスク	カップ	ポイント
材質	POM、シリコン、酸化アルミニウム		
推奨回転数	5,000~10,000rpm		

3.ディスク(単回使用)

種類	コース (荒)	ミディアム (中荒)	ファイン (細)	スーパーファイン (極細)
サイズ	直径 9.5mm/12.7mm			
材質	ディスク:PET、アルミニウム、酸化アルミニウム			
推奨回転数	7,000~10,000rpm			

4.マンドレル



材質:ステンレス鋼 303

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

1.ツイスト

- (1)歯科用ハンドピース等に取り付ける。
- (2)ミディアム、ファインの順で、コンポジットを研磨する。

2.ワンステップ

- (1)補綴物等の形態修正および荒研磨を行った後、本品を歯科用ハンドピース等に取り付ける。
- (2)注水下で、ソフトタッチで断続的に補綴物等に押し付けて研磨を行う。

3.ディスクの使用方法

- (1)ディスクをマンドレルに確実に固定されるまでゆっくり押し込む。
- (2)ディスクは、コース(荒)、ミディアム(中荒)、ファイン(細)、スーパーファイン(極細)の順で使用する。
- (3)ソフトタッチで断続的に補綴物等に押し付けて使用する。常に同一方向に向かって研磨を行うこと。
- (4)使用後はディスクをマンドレルから取り外す。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ディスクは専用のマンドレルを使用すること。
- ・15,000rpm 以上で使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 3.過度の発熱は歯髄に影響が出るため、回転数や使用時間を適切に調節すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

[使用前の点検]

使用前に点検し、破損・変形・異物混入などの異常がある場合は使用しないこと。

[滅菌条件等]

- ・ツイスト、マンドレル
- 滅菌パックに入れ、オートクレーブ滅菌(134℃で5分)すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
 電話番号 03-5808-9350
 製造国 中華人民共和国
 製造業者 Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd.
 (タンジャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)