

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ (35768000)
インプラント清掃用 NiTi ブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

種類	全長
ナノ 	約 34mm
ポケット 	約 37mm
ポケットショート 	約 34mm
オメガ 	約 36mm

材質

ブラシ部: ニッケルチタン合金

シャंक部: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科医師及び歯科衛生士が使用することを目的とした、インプラント表面の清掃に用いる回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 使用前に、本品が滅菌済みであることを確認する。
2. 本品をコントラングルハンドピースに装着する。
3. 注水下で、インプラントフィクスチャーの溝に本品のブラシ部をあて、清掃およびデブリайдメントを行う。
※推奨回転数: 600～1,200rpm

[使用方法における使用上の注意]

- ・本品をハンドピースに装着後、口腔外で試運転を行い、確実に装着されていることを確認する。
- ・本品を使用する際は、必ず注水下で行うこと。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用を避けること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- ・本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・本品は非滅菌製品のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。また、滅菌後は使用するまで滅菌パックに入れ清潔な状態で保管すること。
- ・本品に破損、変形、異物、汚染がある場合は使用しないこと。
- ・同一患者に 1 本のブラシを複数回使用する場合は、3%の過酸化水素水に浸し、滅菌生理食塩水で十分に水洗してから使用すること。
- ・本品は、インプラントをしている患者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した室温で保管すること。

[有効期間等]

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。

【保守・点検に係る事項】

[使用前の点検]

使用前にブラシを点検し、破損・変形・異物混入などの異常がある場合は使用しないこと。

[滅菌条件等]

滅菌パックに入れ、オートクレーブ滅菌すること。
134℃で 15 分、乾燥 20 分

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	大韓民国
製造業者	HANS Korea Co., Ltd. (ハンス'コリア)