

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ(35768000)  
スマートマイクロタフトブラシ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 許容回転数を超えて使用しないこと。
3. 再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

名称	形状
CA用 ソフト	
CA用 ミディアム	
CA用 ハード	
CA用 スティッフ	
スクリュータイプ用 ソフト	
スクリュータイプ用 ミディアム	
スクリュータイプ用 ハード	
スクリュータイプ用 スティッフ	

材質：ポリアミド、真鍮、その他

**【使用目的又は効果】**

歯面等の清掃および研磨に用いる。

**【使用方法等】**

- 1) 脱着方法  
本品の金属部を保持し、ストレート・ギアードアングルハンドピースの製造販売業者の指示に従って脱着します。

- 2) 操作方法  
正回転にて作動させます。  
本品を対象物に対し断続的に軽く押し当てて清掃・研磨してください。

許容回転数：先端部 1,500～10,000rpm

※歯面研磨材等を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本品は未滅菌品であり、使用前に洗浄、消毒、滅菌を、其々の添付文書に従って行うこと。
- 2) オートクレーブ滅菌は 134～137℃で 3 分以上行うこと。滅菌は 137℃以下で行うこと。
- 3) 本品を脱着する際には金属部のみを保持し、ストレート・ギアードアングルハンドピースの添付文書に従い脱着し、軸部が完全に装着されていることを確認すること。  
スクリュータイプ用は、Young Dental Manufacturingの歯科用マンドレル（販売名：マンドレル）または（販売名：アダージオ等の）専用のストレート・ギアードアングルハンドピースを使用し、正回転にて作動すること。逆回転での使用はしないこと。本品が外れる原因となります。
- 4) 使用前に、予め口腔外で作動させ、軸ブレや異常がないことを確認すること。
- 5) 対象物に強く押し付けず、軽く押し当てて使用すること。過度の圧力は、過度の発熱や破損の原因となるため避けること。
- 6) モーターの回転が完全に停止したことを確認した後、本品の脱着を行うこと。
- 7) 本品の許容回転数は、1,500～10,000rpm です。許容回転数を超えて使用しないこと。

**【使用上の注意】**

- 1) 使用注意
  - ①無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。変形する可能性があります。
  - ②再使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
  - ②感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Stoddard Manufacturing Company Limited (スタッダード マニュファクチャリング 社)
製造国	英国