

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

ペリオリフレッシュ

【禁忌・禁止】

本材が皮膚に付着したり、目に入らないようにすること。
本材に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 本材の形状・性状、成分は以下に記載のとおり。

構成成分	形状	成分
ペリオリフレッシュ	ボトル 淡黄色 ジェル	クエン酸、二酸化ケイ素、 精製水、その他

2. 原理：
主材(クエン酸)がバイオフィルム等に浸透し、研磨材にブラッシング等の器械的作用を加えることにより歯面を清掃、研磨する。

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

ジェル状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

- ペリオリフレッシュをダップングラス等に取り分ける。
- 患部歯面(露出歯面、歯肉縁下あるいは歯肉ポケット内など)に、ポケットクリーナー(別売：(株)モリムラ)等にて本品を塗布し、15 秒間以上放置する。
- インスツルメンテーションやポケットクリーナー等にて優しくブラシするようにして、清掃、研磨する。
- 必要に応じ、この処置を反復する。
- 滅菌水あるいは生理食塩水で患部を洗浄しながら、エアバキュームで吸引する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 本材は容器の蓋を取ったままで置かないこと。使用後は必ずキャップを確実に閉めて保管すること。
- 感染予防のため、また本材との接触を避けるために、必ず保護グローブや保護メガネ等を使用すること。
- 他の製品と混合して使用しないこと。
- 使用後の容器は、「廃棄物に関する法律」等に従い、適切に処理すること。
- 本材を使用するにあたっては、本材が患者の症例に適合するかどうか、歯科医師が判断すること。
- 本材の使用後に知覚過敏が生じた場合にはスーパーシール 5 秒(別売)を適用すること。

〔重要な基本的注意〕

- 誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合には、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本材の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
- 本材が、患部口腔軟組織等に、処置のために要する時間以上に長時間接触しないよう注意すること。処置を終える際には、【使用方法等】に記載の洗浄を行うこと。
- 本材が皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着した場合は、すぐに流水で洗浄すること。万一、目に入った場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 直射日光、高温多湿を避け 15～25℃の暗所に保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

〔有効期限等〕

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Phoenix Dental, Inc. (フェニックスデンタル社)
製造国	アメリカ合衆国(USA)