

歯科材料（9）歯科用研削材料
 一般医療機器 歯面研磨材（70904000）
マイクロプロフィーB+

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

外観写真	粒子	状態	色
	90ミクロン	粉末	白

【使用目的は効果】

＜使用目的＞

歯面清掃器等により、本品を噴射させることにより、歯面等を清掃及び研磨する。

【使用方法等】

用途に応じて選択した本品 [マイクロプロフィーB+] を適量取りだします。歯面清掃器等の容器に充填し、使用します。

※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

①取り出した後の本品 [マイクロプロフィーB+] は密封できる容器にて保管し、早めに使い切るようにしてください。

※本体容器に戻さないこと。

②水分を含んだ可能性のある本品 [マイクロプロフィーB+] は保管せずに使い切ること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

①誤飲には十分注意すること。

②本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵除去装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないようにすること。

③保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散した本品から眼・鼻・口等を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1) 使用後は本品を湿気や汚染から保護するために、密封容器にて保管すること。

2) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ

電話番号 03-5808-9350

製造業者 ZEST ANCHORS LLC

(ゼスト アンカーズ エルエルシー)

製造国 アメリカ合衆国