

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材（70904000）
プロケア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



性状：白色粉末

成分：長石、プロピレングリコール、ペパーミントオイル、その他

＜原理＞本品に含まれる研磨成分の作用により、物理的に歯面の凹凸をなだらかにする。

【使用目的又は効果】

歯科予防治療用ブラシ（販売名：プロフィーブラシ）、歯磨カップ（販売名：プロフィーカップまたはプロフィーカップ L F）等を用いて歯面などの清掃及び研磨するために用いる。

【使用方法等】

- ① 本品[プロケア]を水またはフッ化物配合ジェルと混和します。
《最適混合比》水：本品[プロケア]＝1：3
水 1 に対し本品[プロケア]を 3 の比率で混和します。
《目安》プロケア 1 g が一回分の使用量です。
それに対し水を 0.3 ml 加えて混和します。
※患者の状態に合わせて配合比を微調整し、粘度を加減してください。
※ 1 回に使い切る分量のみを混和してください。混和後の本品を保存または再利用しないこと。
- ② 歯磨カップ（販売名：プロフィーカップまたはプロフィーカップ L F）または歯科予防治療用ブラシ（販売名：プロフィーブラシ）に適量とり、歯面清掃します。
- ③ 歯面及び口腔内を十分に洗浄します。本品[プロケア]が口腔内に残らないようにしてください。
※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 混和後の本品は再利用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により、発疹・かゆみ・蕁麻疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止し、専門医に相談するなど適切な処置を施すこと。
 - ② 感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。
 - ③ 誤飲には充分注意すること。
 - ④ 再使用はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Young Dental Manufacturing (ヤング デンタル マニュファクチャリング社)
製造国	アメリカ合衆国