

歯科材料（9）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ(35768000)
トクヤマ歯面清掃ブラシ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品またはニッケルに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 許容回転数を超えて使用しないこと。
3. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

構造：

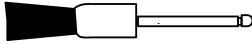

材質：天然毛（豚）、真鍮（ニッケルめっき）

【使用目的又は効果】

本品は、歯の清掃と研磨に用いることを目的としたブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

1) 脱着方法

＜ストレート・ギアードアングルハンドピースとの脱着＞
各種ストレート・ギアードアングルハンドピースメーカーの添付文書または使用方法をご参照下さい。

2) 操作方法

正回転にて作動させます。

本品〔トクヤマ歯面清掃ブラシ〕に歯面研磨材を適量とり、対象物に対し断続的に軽く押し当てて研磨してください。

許容回転数：先端部 300～2,000rpm

※別売品を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ① ストレート・ギアードアングルハンドピースとの脱着については、メーカーの使用方法に従い、軸部が完全に装着されていることを使用前に確認すること。
- ② 本品を脱着する際には金属部のみを保持すること。
- ③ 患者に使用する前に、予め口腔外で作動させ軸ブレのないことを確認すること。
- ④ 対象物に強く押し付けず、軽く押し当てて使用すること。
- ⑤ モーターの回転が完全に停止したことを確認した後、本品の脱着を行うこと。
- ⑥ 本品の許容回転数は、300～2,000rpm です。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 本品はストレート・ギアードアングルハンドピースを使用すること。
- ② 許容回転数を超えて使用しないこと。
- ③ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。変形する可能性があります。
- ④ 再使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
- ② 感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

・トクヤマ歯面清掃ブラシ 12 個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	Young Dental Manufacturing (ヤング デンタル マニュファクチャリング社)
製造国	アメリカ合衆国
発売元	株式会社トクヤマデンタル
住所	〒110-0016 東京都台東区台東 1-38-9
電話番号	(フリーダイヤル) 0120-54-1182