

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)
ミキシングチップグリーン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要: 本品は印象材用のプラスチック製のミキシングチップである。

2. 外観図



長さ: 89 mm 最大径: 16 mm



ミキシングチップグリーン

3. 原材料: ポリプロピレン (本体)、ポリオキシメチレン (ミキサー)

【使用目的又は効果】

歯科材料 (印象材料など) を練和、注入するために用いる。

【使用方法等】

1. カートリッジをカートリッジディスペンサー (カートリッジガン) (図はビスコ社製を例示。別売なし。同型他社製で可使用) に、カートリッジディスペンサー製造者の指示に従い、装着する。
2. カートリッジのキャップを反時計方向に止まるまで (90 度) 回し、水平にして手前に引いて外す。キャップは処分せず、使用後にカートリッジキャップとして使用する。約 5cm の長さでミキシングパッド等に押出し、一様に押出されることを確認する。確認後は、これを処分し、カートリッジの溢出口を拭き、清掃する。
3. ミキシングチップグリーンのカートリッジ取付部辺縁周囲にある V 字の切れ込みを、カートリッジの V 字切れ込みに合わせ、無理のない様な力で挿入し、時計方向に 90 度回転させ、装着固定する。抜けないことを確認する。
4. リピールクリアマトリックスを製造者の指示に従い、使用する。
5. 使用後はミキシングチップグリーンをカートリッジキャップに替え、確実に閉めること。
6. カートリッジディスペンサーからカートリッジを製造者の指示に従い、外す。

【使用上の注意】

[使用注意]

使用する印象材の詳細については、その添付文書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光、高温多湿を避け保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	BISCO, Inc. (ビスコ インク社)
製造国	アメリカ合衆国