

2026 年 1 月（第 1 版）

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000
テンピークス グレイシアゼロ バイナルグローブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】
（概要）

本品はポリ塩化ビニル製で、可塑剤は DOTP（非フタル酸系）を使用しており、DOP（フタル酸系）は使用していない。副材料に打粉を含まないパウダーフリーの未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋である。

（形状・構造）

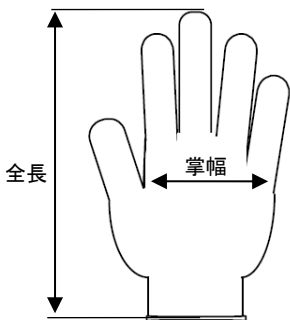

サイズ	掌幅	全長
S	85±5	240 以上
M	95±5	
L	105±5	
LL	115±5	

（単位：mm）

（原理）

治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に、主に使用者の手に装着することにより、本品が防護壁となり患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して着用する。

【使用上の注意】

1) 使用注意

1. 本品はディスポーザブル製品であるので再使用は行わないこと。
2. 開封後の箱は直射日光や強い人工光を避けること。
3. 本品を強い化学薬品に対し長時間直接使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

1. 万一、装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
2. 使用後は感染防止に留意して、医療廃棄物として適切に処分すること。
3. 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保存方法

暗所および室温で保管すること。

手袋は直射日光などの紫外線や、酸化剤に触れる環境に置かないこと。

2) 使用期限

製造後 5 ヶ年〔自己認証による〕

【包装】

入数は、各包装材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

株式会社モレncyコーポレーション

東京都中野区東中野五丁目 1 番 1 号 ユニゾンモール 3F

TEL:03-5338-3911