

医療脱脂綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿100%の脱脂綿
- 2) 本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない
- 3) セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間/9:00~17:00 (月~金※祝日を除く)