

2016年 2月（新様式第2版）（新記載要領に基づく改訂）  
2005年 4月（第1版）

届出番号 27B3X00146000004

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

# 医療ガーゼ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

## 【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿100%のガーゼ
- 2) 本品は、白い布で、におい及び味はない。
- 3) セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00（月～金※祝日を除く）

## 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

## 【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

## 【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。