

2016年 2月（新様式第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2005年 4月（第1版）

届出番号 27B3X00146000009

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

キカクガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿100%のガーゼ
- 2) 本品は、白い布で、におい及び味はない。
- 3) セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、
液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官
の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に
適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具
をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してくださ
い。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管
すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00（月～金※祝日を除く）