

滅菌プレペイドP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿100%の不織布ガーゼを滅菌したもの
- 2) セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、
液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から
成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 包装袋が開封、破損又は汚損している時は滅菌品とし
て使用しないこと。
- 3) 使用時に開封すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してくださ
い。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管
すること。

2. 使用期限

使用期限（自己認証による）はパッケージに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00（月～金※祝日を除く）