

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

ワイラップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

- 1) 本品は、重ねられた複数枚の医療ガーゼの内部の一角にX線造影板を挿入し、識別用綿テープとともにその部分と周囲ならびに対角線状等を縫製したセルローススポンジである。
- 2) ガーゼ、綿テープ、縫い糸：綿 100%
- 3) X線不透視板の成分
固定材：ポリ塩化ビニル
造影剤：硫酸バリウム
着色剤：青色顔料

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00（月～金※祝日を除く）