

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入ガーゼ 32374000

滅菌X線造影材入ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと
- 3) X線造影系を直接挟んで使用しないこと
[切れたり抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 4) 電気メス等を近づけないこと
[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿100%のガーゼにX線造影系を織り込んだもの
- 2) X線造影系の材質
造影剤：硫酸バリウム 固定材：ポリプロピレン
着色剤：青色顔料

【使用目的又は効果】

- 1) 出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。
- 2) X線を検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 包装袋が開封、破損又は汚損している時は滅菌品として使用しないこと。
- 3) 使用時に開封すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限（自己認証による）はパッケージに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00（月～金※祝日を除く）