

## ヤマトニトリル手袋MD

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

本品はニトリルゴム製のパウダーなし・未滅菌の単回使用の検査・検診用手袋です。

平手タイプの左右兼用、指先にエンボス加工が施されています。

| サイズ         | SS  | S  | M  | L   |
|-------------|-----|----|----|-----|
| 全長(mm:以上)   | 230 |    |    |     |
| 掌幅(mm)±10mm | 70  | 80 | 95 | 110 |

## 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用します。

## 【使用方法等】

小箱取り出し口より手袋を丁寧に取り出し、装着してください。

## 【使用上の注意】

## 1.使用注意

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹などの症状が現れることがあります。異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、必要に応じて医師に相談してください。

## 2.重要な基本的注意

- 複数の患者に使用しないでください。
- 使用前、使用中に破損やピンホール等の異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 鋭利な器具に接触した場合、破れや穴があくことがありますのでご注意ください。

## 3.相互作用

薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので確認の上使用してください。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1.保管方法

- 水濡れに注意し、高温多湿を避けて保管してください。
- 直射日光、紫外線、オゾン、強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないでください。

## 2.有効期間

使用期限（自己認証による）は包装に記載しています。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場

大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75

お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731

受付時間／9:00～17:00（月～金※祝日を除く）